

## ファイバーポストチェッカー



- ・ファイバーポストの直径(1.0・1.2・1.4・1.6)のうち、どのサイズが最も適しているかを検討するためのインスツルメントです。
- ・3mm毎の目盛りが付与されていることで、築造窩洞の深さを確実に把握することができ、ファイバーポストの長さを定めることが可能です。
- ・ファイバーポストでの試適が不要となり、唾液等による汚染が避けられ、質の高い接着支台築造を行うことが可能です。



○ φ1.0mm

○ φ1.4mm

### 【試適前】




### 【1.0のファイバーポストチェッカーで試適】



- ・ガッタパーチャが充填されている上部＝ファイバーポストの窩底部となる箇所とインスツルメントに隙間がない事を確認ください。
- ・根管の形状が原因で隙間ができてしまう場合は他のサイズのチェッカーで”試適”してください。

※本来ファイバーポスト本体で試適を行う為、インスツルメントで行う同じ行為を”試適”と表現しております。

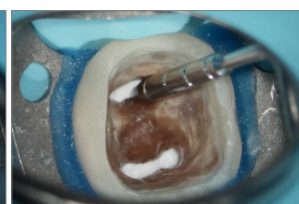

写真提供：渥美 克幸 先生 (デンタルクリニックK 院長)

# 1.0-1.2

コード No.08081  
標準価格 4,400円

# 1.4-1.6

コード No.08082  
標準価格 4,400円

### 【ファイバーポストチェッカー サイズ表】



| 最先端径 (A) | テーパ距離 (B) | 径 (C)  |
|----------|-----------|--------|
| φ0.3mm   | 2mm       | φ1.0mm |
| φ0.5mm   | 2mm       | φ1.2mm |
| φ0.7mm   | 2mm       | φ1.4mm |
| φ0.9mm   | 2mm       | φ1.6mm |

φ1.2mm ○

φ1.6mm ○