

干渉電流型低周波治療器

ジェントルスティム・EX

摂食嚥下リハビリテーションに新たな選択肢



Thinking ahead. Focused on life.

Features

干渉電流による刺激療法で、上喉頭神経にアプローチ



痛みが少ない干渉電流

中周波領域の周波数を使用しているため、皮膚抵抗値が小さく痛みが少ない電気刺激です。

干渉波刺激療法とは

干渉波刺激療法は中周波の刺激を適応しながら治療部位には低周波数帯の干渉周波数を利用する刺激療法で皮膚刺激が少なく効率的な電気刺激が可能となります。

干渉波イメージ

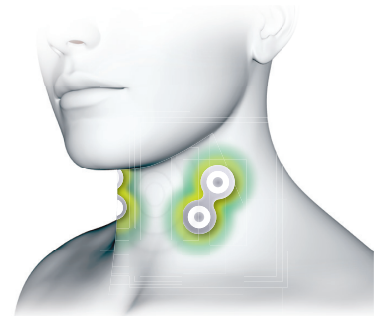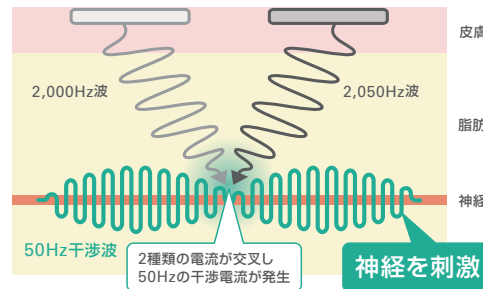

シンプルで簡単な操作性

- ・治療モードを選択し、出力を調整するだけで使用できます。
- ・必要な情報はディスプレイで一目で確認できます。

ディスプレイの表示

- ・残り時間(*1)
- ・治療の設定時間(*2)
- ・見やすい電流レベル(*3)
- ・出力モード(*4)



安全機能

過電流保護機能	治療中に設定値を超える出力を制限し、ディスプレイの表示とサイン音にてお知らせします。
パッド外れ検知	治療中に電極パッドが外れたとき、ディスプレイの表示とサイン音にてお知らせします。
出力操作ロック機能	予期しない出力レベルアップを防止する「出力アップロック」の機能があります。

複数の治療モードを搭載で、より広い電気刺激が可能に

複数の出力パターンから、治療目的や使用状況に適応した出力パターン(治療モード)を選択できます。

モード	出力パターン	出力イメージ(出力値変化)
A	連続出力	刺激
B	変調(強弱)出力	強刺激 弱刺激
C		

Specification

ジェントルスティム・EX

仕様
出力電流 最大9mA(500Ω負荷抵抗)
治療タイマー 5、10、15、20、25、30分
外形寸法 65(W)×173(H)×30(D)mm
重量 215g

電気的定格
定格電源 DC 3.6V(内蔵リチウムイオン電池)
DC 5V(ACアダプタ)

ACアダプタ 型番 UMVUU3012-050020SA
入力 100-240V 50/60Hz
最大出力 10VA(5V、2A)
出力電圧 5V

標準価格 本体セット 390,000円 202740002



標準付属品

AC アダプタ
(UMVUU3012-050020SA)



電極コード(FJ H01)



別売品

ゲルパッド電極(CGD01)
3/パック 2,880円 202740005



電極押さえシート(CG5E1)
3/パック 1,470円 202740010



販売名 ジェントルスティム・EX 一般的名称 干渉電流型低周波治療器 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)/特定保守管理医療機器 医療機器認証番号 306AHBZX00044000

●標準価格の後の数字は品目コードです。●掲載商品の標準価格は、2025年9月22日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●ご使用に際しましては、製品の添付文書および使用方法を必ずお読みください。

●仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●製品の色は印刷のため、実際とは異なる場合がございます。

販売 株式会社モリタ 大坂本社: 大坂府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06.6380 2525 東京本社: 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03.3834 6161

お問合せ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T 0800.222 8020 (フリーコール)

www.dental-plaza.com

PUB NO.M8372.1.2508.65,342G.IO/ZU 208853657